

SCHMITZ

A Sense of Confidence

Partura®
Das Schmitz-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher –
für eine präventive Geburtshilfe



Partura® Komfortabel und vielseitig - mit Sicherheit



Konzept: Karin Berghammer/
Iris Podgorschek
Design: podpod design

Das Entbindungsbett ist so konzipiert, dass die werdende Mutter möglichst viel Bewegungsfreiheit während der Eröffnungs- und Austreibungsphase erhält. So lässt es sich mittels einer Handschaltung stufenlos verstellen. Die werdende Mutter kann ganz individuell selbst ihr Bett einstellen. Auf der angenehm gepolsterten Liegefläche ist genug Platz für eine aktive Unterstützung durch den Partner. Das Fußteil kann auch als Sitz für die Hebamme genutzt werden.

Neben der sicheren ärztlichen Versorgung hat die Zufriedenheit der Patienten im heutigen Krankenhausalltag einen hohen Stellenwert.

Das Entbindungsbett von Schmitz wird jedem Anspruch gerecht:

Es verbindet ansprechendes Design mit hohem Komfort für die werdende Mutter und optimalen Arbeitsbedingungen für das Geburtshilfeteam.

Die geschlossene, glatte Bettverkleidung und die Polsterflächen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Und – falls notwendig – lässt sich das Bett durch ein paar Handgriffe so verstellen, dass eine schnelle ärztliche Intervention möglich ist.

Das Entbindungsbett für eine sichere und sanfte Geburt.

Eröffnungsperiode,
Bett in niedrigster Position (64 cm)
zum Wechsel zwischen
Entspannung und Bewegung,
die geringe Betthöhe erleichtert den
Ein- und Ausstieg



Austreibungsperiode in
vertikaler Haltung mit Partner,
die Frau kann sich
an ihren Partner anlehnen,
Körperkontakt

Geburt in Steinschnittlage,
klassische Position



Geburt in tiefer Hocke,
Optimierung der Geburtsachse,
maximale Kyphoisierung,
Damm ist entlastet

Geburt mit Beckenhochlagerung bei
Schulterdystokie, operativen Eingriffen
oder Manualhilfe



Geburt in tiefer Hocke mit
Partner, Möglichkeit, die Frau
beim Durchtritt des Kopfes etwas
anzuheben, Körperkontakt

Eröffnungs- und/oder
Übergangsperiode in
Knieellenbogenlage bei
Pressdrang trotz Restmuttermund
und bei intrauteriner Asphyxie



Operative Geburt,
Zangen- oder Vakuumextraktion,
Manualhilfe bei Beckenendlage,
Post partum zur Versorgung des
Dammes, bei manueller Plazentalösung

Geburt in Knieellenbogenlage,
bei Mehrgebärenden mit
vorangegangener Epi
zur Entlastung des Dammes und bei
besonders großen Kindern



Sectio Caesarea im Kreißsaal
bei absoluter Indikation

Post partum,
bei Geburt in Knieellenbogenlage,
die Frau muss sich nach der Geburt
nicht um die eigene Achse drehen
und kann sich einfach zurücksetzen



Schocklage bei Nabelschnurvorfal
oder Kreislaufkollaps

Austreibungsperiode in vertikaler
Haltung, bequeme Sitzposition;
durch die Ausnehmung in der
Matratze entsteht kein Druck auf den
Damm. Frau braucht keinen Partner,
Manualhilfe bei Beckenendlage
möglich



Beinhochlagerung zur Entspannung

Partura® Entbindungsbett Perfekt ausgestattet

Partura Entbindungsbett 140.01.101

- Das Fußteil kann vom Hauptteil getrennt werden – bessere Zugänglichkeit für Hebamme und Arzt – Fußteil auch als Sitz oder Ablage nutzbar.
- Parallele und separate elektromotorische Höhenverstellung von Haupt- und Fußteil.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch geschlossene, glatte Flächen, abnehmbare Polster.
- Fahrbar mittels Lenkrollen – Zentralfeststellung.
- 24 Standardfarbtöne für eine attraktive Farbgestaltung.
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten, hohe Stabilität und viel Platz für unterschiedlichste geburts-erleichternde Positionen – auch unter Einbeziehung des Partners.
- Verstellfunktionen elektrisch über 2 Handbedienungen.
- Sanfter Anlauf der Bettbewegungen.
- Multifunktionale Rückenlehne, einsteckbar am Haupt- und Fußteil.
- Beinhalter mit Kugelgelenk für schnelle Verstellung aus der Park-in die Akutposition.
- Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.



Lackierung:
1. Farbe signalgelb RAL 1003
2. Farbe graualuminium RAL 9007



1 Beinhalter lassen sich einfach und schnell unter die Liegefläche schwenken und wieder in die Behandlungsposition bringen.

2 Rückenlehne auch am Fußteil einsteckbar.

3 Parkposition der Handgriffe an der Kopfseite des Hauptteiles bei Nichtgebrauch.

4 Hauptschalter, Potentialausgleich, Akkuzustandsanzeige, Kaltgeräte-Steckdose

5 Infusionsstange an der Kopfseite oder seitlich links und rechts einsteckbar.

6 Handgriffe zum leichten Manövrieren des Fußteils. Feststellhebel für Fußteilarretierung.

7 Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil.

Zubehör:

8 **Kissen 104.01.601** zur Rückenunterstützung

Spannbezug 104.01.602 für zweiteiliges Polster, weiß, kochfest bis 95° C, ab 5 Stück ab 10 Stück

9 **Haltebügel 104.01.603** zur Stabilisierung des Schultergürtels, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, neigbar und höhenverstellbar, mit zwei drehbaren Spannkloben aus Chromnickelstahl, auf Seitenschiene montiert

10 **Seitenstützen (Paar) 104.01.604** abnehmbar, aus Stahlrohr pulverbeschichtet, Befestigung aus Chromnickelstahl, seitlich am Rückenteil montiert

11 **Spülbecken 104.01.605** aus Chromnickelstahl, 355 x 325 x 100 mm (L x B x T)

12 **Fußstützen (Paar) 104.01.606** Befestigung aus Chromnickelstahl, Fußplatten Kunststoff, grau



Partura® Entbindungsbett

CE

Serienmäßige Ausstattung

Partura Entbindungsbett
Modell-Nr. 140.01.101
Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und
Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen,
Zentralfeststellung.

Haupt- und Fußteil sind trennbar. Das Fuß-
teil kann unter das Hauptteil geschoben
werden, vier Rasterpositionen.

Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm.

Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil,
aus hochelastisch beschichtetem Schaum-
stoff, feuchtigkeitsundurchlässig, gegen
Verrutschen gesichert.

1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95° C.

Verkleidungen und Rahmen aus pulver-
beschichtetem Stahlblech, Farben nach
Farbkarte.

Rückenlehne an der Kopf- und Fußseite
einsteckbar, mit Kunstlederbezug granit-
grau 89.

Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickel-
stahl 18/10, Integralschaumpolster silber-
grau, höhenverstellbar. Zwei Drehgelenke
zur Aufnahme der Beinhalter. Schnell ver-
stellbar aus der Park- in die Akutposition.

Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10,
Integralschaum silbergrau, seitlich einsteck-
bar.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickel-
stahl 18/10, zur Befestigung an der
Kopfseite und im Bereich der Handgriffe,
höhenverstellbar.

Rückenstütze im Bereich des Sitzaus-
schnittes, halbrund, Integralschaum silber-
grau, für die Geburt in tiefer Hocke.

Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel,
links und rechts am Hauptteil, für die stu-
fenlosen elektromotorischen Verstellungen:

- Höhenverstellung der Liegefläche
des Hauptteils
- Rückenteilverstellung
- Sitzteilverstellung
- Neigung der Liegefläche (Schocklage)
- Höhenverstellung des Fußteiles
(bei Verbindung mit Hauptteil)

Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall
durch integrierte Akkus.

















Technische Daten

Höhenverstellung des Hauptteils	von 645 - 925 mm
Höhenverstellung des Fußteils	von 460 - 925 mm
(nur bei Verbindung mit Hauptteil möglich)	
Außenmaße des Entbindungsbettes mit eingesteckter Rückenlehne	
2330 x 1015 mm (L x B)	
Liegefläche 1950 x 950 mm (L x B)	
Länge Rückenlehnenmatratze	890 mm
Länge Sitzteilmatratze	350 mm
Länge Fußteilmatratze	695 mm
Matratzendicke	80 mm
Neigungswinkel Hauptteil	0-12 Grad
(Schocklage)	
Neigungswinkel Rückenteil	0-78 Grad
Neigungswinkel Sitzteil	0-27 Grad
Sichere Arbeitslast Hauptteil	220 kg
Sichere Arbeitslast Fußteil	135 kg
Gewicht Fußteil	110 kg
Gewicht Hauptteil	265 kg
Gesamtgewicht	375 kg
Netzspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,76 KW
Schutzklasse	I/B




Farben

2-teiliges Polster für Haupt- und
Fußteil granitgrau 89.
Rückenlehne granitgrau 89.
Beinhalterschalen, Handgriffe
und Rückenstütze
Integralschaum silbergrau.
Stahlteile pulverbeschichtet nach
Schmitz-Farbkarte.

Lackierungen

	grauweiß RAL 9002
	reinweiß RAL 9010
	alabastergrau RAL 0007500*
	lichtgrau RAL 7035
	anthrazitgrau RAL 7016
	tiefschwarz RAL 9005
	weißaluminium RAL 9006
	graualuminium RAL 9007
	rapsgelb RAL 1009050*
	signalgelb RAL 1003
	gelborange RAL 0506060*
	hellelfenbein RAL 1015
	saharabeige RAL 0607030*
	kupferbraun RAL 8004
	altrosa RAL 3014
	zartflieder RAL 3108010*
	jadegrün RAL 1808010*
	tannengrün RAL 1703020*
	limonengrün RAL 1008060*
	laubgrün RAL 1206050*
	türkisblau RAL 5018
	weißblau RAL 2408015*
	hellblau RAL 2606030*
	saphirblau RAL 5003

* RAL Zwischentöne

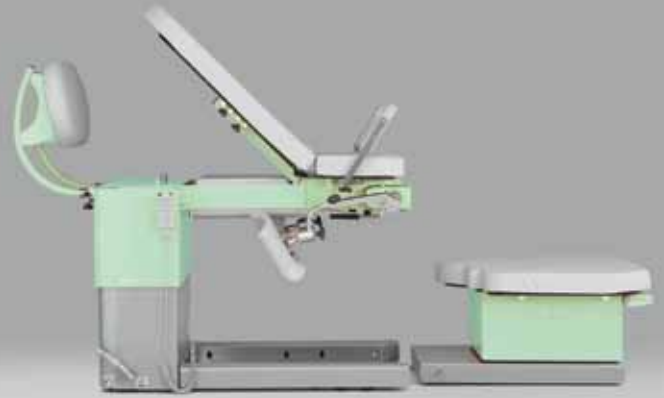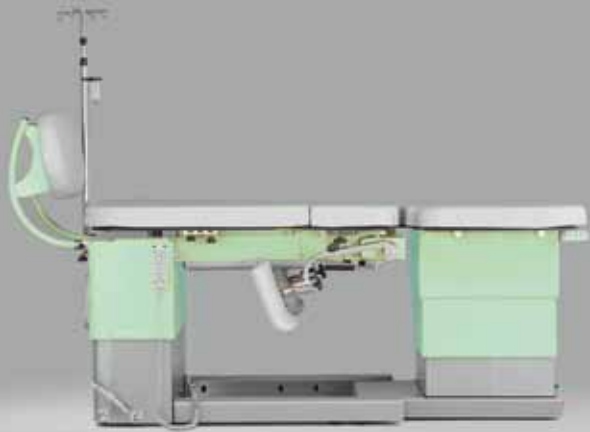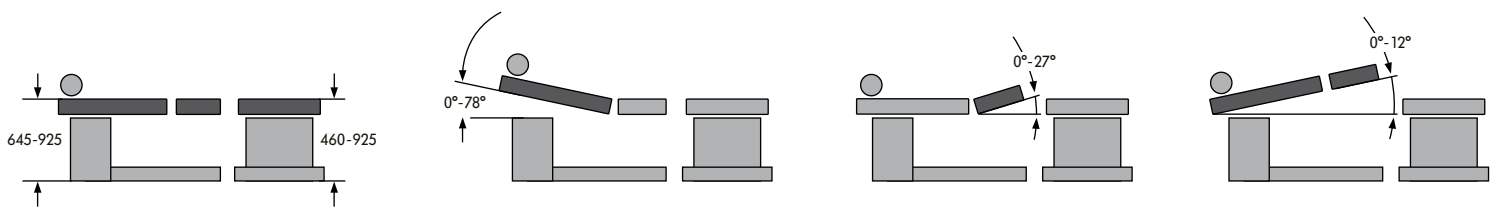



Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostfeld 29
Telefon +49 (0)2377 84 0
Telefax +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
Telefax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
Telefon +49 (0)2377 84 550
Telefax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse I.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

Werksvertretungen:

**Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen**
(PLZ-Gebiete 21/29/30/31/34/37/38)
Sachsen-Anhalt
(PLZ-Gebiete 29/38/39)

Kai Horstschäfer
Mergelheide 34
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon +49 (0)5207 95733 06
Telefax +49 (0)5207 95733 08
Mobil +49 (0)172 7362075
horstschaefer@schmitz-soehne.de

**Nordrhein-Westfalen
Berlin
Bremen
Brandenburg**
(PLZ-Gebiete 14/15/16/17/19)
Niedersachsen
(PLZ-Gebiete 26/27/28/48/49)

Wolfgang Gülde
Meßbergstraße 26
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon +49 (0)2377 84 123
Telefax +49 (0)2377 84 162
Mobil +49 (0)171 4114999
guelde@schmitz-soehne.de

**Sachsen, Thüringen
Sachsen-Anhalt**
(PLZ-Gebiet 06)
Brandenburg
(PLZ-Gebiet 03)

Dr. Reinhardt Raum
Weststraße 4
01445 Radebeul
Telefon +49 (0)351 8386 400
Telefax +49 (0)351 8386 641
Mobil +49 (0)172 8984635
raum@schmitz-soehne.de

**Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden-Württemberg
Luxemburg**

Franz Fischer GmbH
Franz Fischer
Pater-Delp-Straße 12
63179 Obertshausen
Telefon +49 (0)6104 74559
Telefax +49 (0)6104 973032
fischergmbh@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Thomas Prantner
Bahnhofstraße 2d
86871 Rammingen
Telefon +49 (0)8245 904005
Telefax +49 (0)8245 968568
Mobil +49 (0)152 09077059
prantner@schmitz-soehne.de

Spanien
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, nº 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Spanien
Telefon +34 (0)91 6404514
Telefax +34 (0)91 6366305
schmitz@schmitz.es

Schweiz
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen, Schweiz
Telefon +41 (0)52 6432 505
Telefax +41 (0)52 6432 691
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin du Bois 32
1020 Renens VD, Schweiz
Telefon +41 (0)21 69174 66
Telefax +41 (0)21 69174 62
Mobil +41 (0)79 2128334
f.poncet@bluewin.ch

Russland und Osteuropa
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Bornaische Str. 180
04279 Leipzig, Deutschland
Telefon +49 (0)341 33780 34
Telefax +49 (0)341 33780 35
Mobil +49 (0)152 09077058
kosolapov@schmitz-soehne.de

China
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Guangzhou Representative Office
World Trade Centre,
North Tower 3105
Huan Shi East Road 371-375
Guangzhou 510095, P.R. China
Telefon +86 (0)20 87613301
Telefax +86 (0)20 87603923
info@schmitz-soehne.cn

Italien
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL), Italien
Telefon +39 0143 80350
Telefax +39 0143 834253
Mobil +39 349 6338723
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Frankreich
SCHMITZ FRANCE SAS
27, rue du Lieutenant Colonel Prévost
69006 Lyon
Frankreich
Telefon +33 (0)383 229467
Telefax +33 (0)383 228766
info@schmitz-france.fr

Latinamerika
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentinien
Telefon +54 (0)11 4811 4642
Telefax +54 (0)11 4811 4642
Mobil +54 (0)911 68872086
gentile@schmitz-soehne.de



Das komplette Schmitz-Programm



Gynäkologie, Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll eingerichtet



DIAMOND
Operationstische
der Extraklasse



OPX Operationstische
für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel
und zuverlässig



varimed®
Ambulanz- und
OP-Möbiliar



STL 285, STS 282,
STX 280
Spezialtische für
Patiententransport,
Notfall, Ambulanz,
Intensivpflege und
Röntgen



varimed®
Funktionswagen –
unsere Experten
für den Klinikalltag



varimed®
Allgemeines medi-
zinisches Möbiliar für
die Untersuchung
und Behandlung