



SCHMITZ

A Sense of Confidence

Partura®
Le lit d'accouchement Schmitz
solution confortable et sûre –
pour une obstétrique préventive



Partura® confortable et à usage multiple - en toute sécurité



Idée : Karin Berghammer/
Iris Podgorschek
Design : podpod design

Ce lit d'accouchement est conçu de telle manière que la future mère a la liberté de mouvements la plus grande possible pendant les diverses phases de l'accouchement. Les positions du lit peuvent être réglées sans à-coups avec la télécommande manuelle. La future mère peut régler elle-même son lit. Le matelas est large, confortablement rembourré, pour une assistance active par le partenaire. La partie pieds du lit peut aussi être utilisée par la sage-femme comme siège. Outre les soins médicaux assurés,

la satisfaction des accouchées joue aujourd'hui un rôle important dans la vie quotidienne des hôpitaux, des maternités et des cliniques d'accouchement.

Le lit d'accouchement de Schmitz satisfait à toutes les exigences:

Il réunit le design correspondant au confort élevé pour la future mère et les conditions de travail optimales pour l'équipe d'accoucheurs.

Le revêtement lisse et fermé et les surfaces des matelas sont faciles à nettoyer et à désinfecter.

Et – si nécessaire –, en un tour de main, les positions du lit peuvent être modifiées pour permettre une intervention médicale rapide.

Le lit d'accouchement pour une naissance en toute sécurité et en douceur.

Période de dilatation.
Lit en position basse (64 cm)
permettant de passer de
la relaxation aux mouvements,
la position basse facilite la montée
et la descente du lit



Période d'expulsion en position verti-
cale avec assistance du partenaire:
la femme peut s'appuyer contre le
partenaire, il y a contact corporel

Accouchement en
position de lithotomie,
position classique



Accouchement sur tabouret haut.
Optimisation de l'axe de naissance,
cyphose maximale,
soulagement du périnée

Accouchement en position
dorso-sacrée déclive en cas de
dystocie par présentation de l'épaule,
d'intervention opératoire ou en
intervention manuelle



Accouchement sur tabouret haut
avec l'aide du partenaire, qui peut
soutenir la femme au passage de
la tête, contact corporel

Période de dilatation et/ou période
de transition en position génu-
cubitale en cas de compression
d'urgence pour rétention utérine ou
asphyxie intra-utérine



Accouchement opératoire.
Extraction au forceps ou à la ventouse.
Aide manuelle en position du siège
soins post-partum du périnée en cas
d'extraction manuelle du placenta

Accouchement en position
genu-cubitale
en cas de multiparité avec
antécédents d'épisiotomie pour
dégager le périnée et pour enfants
particulièrement volumineux



Césarienne en salle de travail en cas
d'indication absolue

Post partum
d'accouchement en position
genu-cubitale.
Après la naissance, la femme ne doit
pas se retourner et peut se rasseoir
facilement



Etat de choc en cas de procidence
du cordon ombilical ou de collapsus
circulatoire

Période d'expulsion
en position verticale.
Position assise confortable: grâce au
déplacement du matelas, il n'y a pas de
pression sur le périnée. La femme n'a pas
besoin d'assistance, une aide ma-
nuelle en position du siège est possible



Soulèvement des jambes pour
la relaxation

Lit d'accouchement Partura® Parfaitement équipé

Lit d'accouchement Partura 140.01.101

- La partie pieds peut être séparée de la partie principale pour une accessibilité améliorée par la sage-femme et par le médecin - la partie pieds peut également être utilisée comme siège ou comme table d'appoint.
- Réglages simultanés et/ou individuels de la hauteur de la partie principale et de la partie pieds par moteur électrique.
- Nettoyage et désinfection faciles grâce aux surfaces fermées et lisses et aux matelas amovibles.
- Mobile grâce aux roulettes pivotantes avec blocage central.
- 24 coloris standard pour une coloration attractive.
- Un grand choix d'options de réglage, une stabilité élevée et beaucoup d'espace pour des positions soulageant l'accouchement – en incluant le partenaire.
- Fonctions de réglage électriques moyennant deux télécommandes manuelles.
- Démarrage doux (sans à-coups) des mouvements de réglage.
- Dossier multifonctionnel à emboîter dans la partie principale ou dans la partie pieds.
- Appuis-jambe avec articulation à rotule pour un réglage rapide de la position de rangement vers la position d'utilisation.
- Sécurité de fonctionnement en cas de brève interruption de courant grâce aux batteries intégrées.



Couche de laque:
1. couleur – jaune de sécurité RAL 1003
2. couleur – aluminium gris RAL 9007



1
Les appuis-jambes peuvent être vite et facilement pivotés sous le plateau et en cas de besoin remis dans la position utile.

2
Le dossier peut également être emboîté dans la partie pieds.

3
Dépôt des poignées du côté tête en cas de non-utilisation.

4
Interrupteur principal, prise d'équipotentialité, indicateur de l'état de charge des batteries, prise CEI 60320 C13

5
La potence à perfusion peut être fixée aux deux côtés de la tête.

6
Poignées pour un déplacement aisé de la partie pieds, levier de blocage.

7
Deux télécommandes manuelles avec câble spiralé, fixées aux deux côtés de la partie principale.

Accessoires:

8
Coussin 104.01.601
pour soutenir le dos

Housse 104.01.602
pour matelas en deux parties, blanche, lavable jusqu'à 95° C

9
Etrier de maintien 104.01.603
sert à stabiliser la ceinture scapulaire, en tube d'acier, revêtu par poudrage, inclinable et réglable en hauteur, avec deux étaux réglables en acier inox, fixé aux rails latéraux

10
Supports latéraux (paire) 104.01.604
amovibles, en tube d'acier thermolaqué, pièces de fixation en acier inox, montage aux deux côtés du dossier

11
Cuvette 104.01.605
en acier inox, 355 x 325 x 100 mm (L x l x p)

12
Supports-pieds (paire) 104.01.606
éléments de fixation en acier inoxydable, plaques de pieds en matière plastique grise



Lit d'accouchement Partura®

CE

Équipement standard

Lit d'accouchement Partura modèle N° 140.01.101.

Partie principale avec siège et dossier, partie pieds; mobile avec des roulettes pivotantes, blocage central.

Partie siège avec ouverture, rayon 150 mm.

Matelas en 2 parties pour la partie principale et pieds, en matière mousse hautement élastique et à revêtement, imperméable à l'humidité et empêchant les glissements.

Les revêtements et le cadre sont en tôle d'acier à revêtement thermolaqué, couleurs selon nuancier.

1 garniture en 2 parties, blanche, résiste aux températures de lavage jusqu'à 95° C.

Les parties principale et pieds sont séparables. La partie pieds peut être poussée sous la partie principale, 4 positions d'accrochage.

Le dossier peut être emboîté dans le côté tête ou pieds, avec rembourrage en similicuir en gris granit 89.

2 supports-jambes système Göpel, acier inox 18/10, rembourrage intégré en mousse, gris argenté, réglable en hauteur. 2 articulations tournantes pour recevoir les supports-jambes. Mise en place rapide des supports-jambes.

2 poignées en acier inox 18/10, mousse intégrée, gris argenté, à emboîter latéralement.

Tige à perfusion à 4 crochets, en acier inox 18/10, pour fixer au côté tête et au voisinage des poignées, réglable en hauteur.

Dossier au voisinage de l'ouverture du siège, demi-rond, mousse intégrée, gris argenté, pour la naissance en position accroupie.

2 télécommandes manuelles avec câble spiralé, fixée aux deux côtés de la partie principale; pour les réglages continus par des moteurs électriques:

- Réglage en hauteur de la partie principale
- Réglage du dossier
- Réglage du siège
- Inclinaison de la partie principale (position choc)
- Réglage en hauteur de la partie pieds (si elle est accrochée à la partie principale)

Sécurité de fonctionnement en cas de brève interruption de courant grâce aux batteries intégrées.

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur de la partie principale de 645 à 925 mm

Réglage en hauteur de la partie pieds de 460 à 925 mm (possible seulement en liaison avec la partie principale)

Dimensions extérieures du lit d'accouchement 2330 x 1015 mm (L x l)

Couche 1950 x 950 mm (L x l)

Longueur du matelas du dossier 890 mm

Longueur de matelas du siège 350 mm

Longueur de matelas de la partie pieds 695 mm

Épaisseur du matelas 80 mm

Angle d'inclinaison de la partie principale (position choc) 0 à 12°

Angle d'inclinaison du dossier 0 à 78°

Angle d'inclinaison du siège 0 à 27°

Charge maximale d'utilisation (partie principale) 220 kg

Charge maximale d'utilisation (partie pieds) 135 kg

Poids, partie pieds 110 kg

Poids, partie principale 265 kg

Poids total 375 kg

Tension du réseau 230 V AC

Fréquence 50 Hz

Puissance absorbée max. 0,76 KW

Classe de protection I/B






Couleurs

Matelas en 2 parties pour la partie principale, partie pieds: gris granit 89
Rembourrage du dossier: gris granit 89
Supports-jambes, poignées et dossier demi-rond: mousse intégrée gris argenté
Revêtement en tôle d'acier: thermolaqué selon nuancier.

Couche de laque

	blanc gris RAL 9002
	blanc pur RAL 9010
	gris albâtre RAL 0007500*
	gris clair RAL 7035
	gris anthracite RAL 7016
	noir foncé RAL 9005
	aluminium blanc RAL 9006
	aluminium gris RAL 9007
	jaune colza RAL 1009050*
	jaune de sécurité RAL 1003
	orangé jaune RAL 0506060*
	ivoire clair RAL 1015
	beige sahara RAL 0607030*
	brun cuivré RAL 8004
	vieux rose RAL 3014
	pastel lilas RAL 3108010*
	vert jade RAL 1808010*
	vert sapin RAL 1703020*
	vert citron RAL 1008060*
	vert feuillage RAL 1206050*
	bleu turquoise RAL 5018
	bleu blanc RAL 2408015*
	bleu clair RAL 2606030*
	bleu saphir RAL 5003

* Nuances RAL

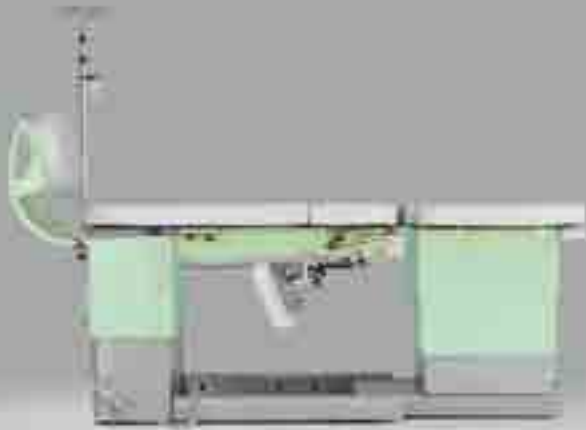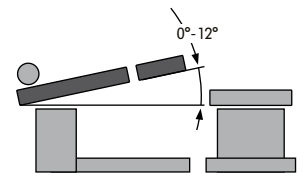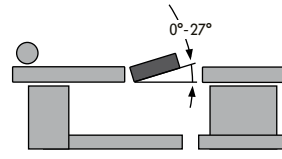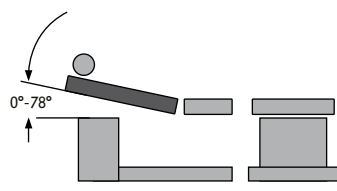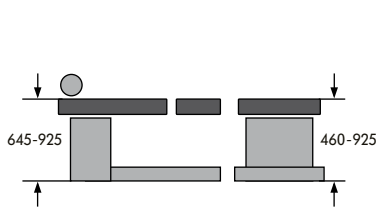



**Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG**

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
Tél. +49-2377-84-0
Fax +49-2377-84-135
www.schmitz-soehne.de
export@schmitz-soehne.de

Schmitz en France:

SCHMITZ FRANCE SAS
27, rue du Lieutenant Colonel Prévost
69006 Lyon
Tél. 03 83 22 94 67
Fax 03 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Schmitz en Suisse:

SCHMITZ SA
François Poncet
Chemin du Bois 32
1020 Renens VD
Tél. 021 691 74 66
Fax 021 691 74 62
Portable 0 79-2 12 83 34
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ SA
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tél. 052 643 25 05
Fax 052 643 26 91
f.poncet@bluewin.ch

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage «CE», les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.



Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!



Le programme Schmitz complet



Gynécologie,
Urologie et
Proctologie
Notre réponse aux
exigences d'un
équipement parfait
et confortable



DIAMOND
Les tables
d'opération, une
classe à part



Tables d'opération
OPX pour les
urgences et salles
d'opération
Flexibilité et fiabilité
uniques



varimed®
Mobilier pour les
blocs opératoires
et les urgences



STL 285, STS 282,
STX 280
Systèmes de trans-
port de patients
pour les urgences,
l'ambulatoire
et la radiologie



varimed®
Les chariots
fonctionnels –
nos experts pour
le quotidien
hospitalier



varimed®
Mobilier d'examen
et de traitement